

BEDIENUNGSANLEITUNG

Krankengymnastische Laufhilfe

MOVITA FITS



Hersteller:

MEDEN - INMED, Spółka z o.o.

UL. WENEDÓW 2

75-847 KOSZALIN

POLEN

TEL. +(0 94) 347 10 40

FAX. +(0 94) 347 10 41

Vertrieb und Service in Polen:

MEDEN - INMED, Spółka z o.o.

UL. WENEDÓW 2

75-847 KOSZALIN

POLEN

TEL. +(0 94) 347 10 40

FAX. +(0 94) 347 10 41

1. EINFÜHRUNG	3
2. BESTIMMUNG DER LAUFHILFE	4
2.1 Indikationen.....	4
2.2 Kontraindikationen.....	4
2.3 Verwendung.....	4
3. TECHNISCHE DATEN	4
3.1 Technische Kenndaten.....	5
4. LIEFERUMFANG	7
5. KONSTRUKTION UND FUNKTIONSWEISE	7
5.1 Kennzeichnung	8
5.2 Symbole	8
6. ALLGEMEINE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN	9
6.1 Einsatzort.....	9
6.2 Nutzungshinweise	9
7. BEDIENUNG DER LAUFHILFE MOVITA FITS	9
7.1 Regulierung der Laufhilfe MOVITA FITS	9
7.2 Höheneinstellung der Brustkorbunterstützung	10
7.3 Brustkorbunterstützung	10
7.4 Sitz.....	10
7.5 Armlehngriff.....	11
7.6 Bremseinrichtung	12
7.7 Stütze der Sitzbaugruppe	12
7.8 Trennwand	12
7.9 Seitenverkleidungen.....	13
7.10 Vorderräder.....	13
7.11 Verkleidung der Brustkorbunterstützung.....	13
8. VORBEREITENDE TÄTIGKEITEN	13
9. TECHNISCHE BETRIEBSBEDINGUNGEN	13
9.1 Haftung des Herstellers.....	13
9.2 Reinigung der gepolsterten Flächen.....	14
9.3 Instandhaltung der Tragkonstruktion	14
9.4 Prüfung der Gasdruckfeder	14
9.5 Service Kontakt	14
10. LAGERUNG UND TRANSPORT	15
11. GARANTIESCHEIN	15

Sehr geehrte Kunden!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung und sind davon überzeugt, dass Sie mit unserem Erzeugnis zufrieden sein werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, da sie Informationen und Hinweise des Herstellers über ordnungsgemäße Handhabung, Bedienung und Instandhaltung des Erzeugnisses enthält.

1. Einführung

Nur die Kenntnis und die genaue Befolgung dieser Bedienungsanleitung gewährleisten einen sicheren, langjährigen und störungsfreien Einsatz dieser Laufhilfe. Ihre Bemerkungen in Bezug auf die Ausführung dieser Laufhilfe sowie den Inhalt dieser Betriebsanleitung richten Sie bitte an unsere Adresse:

Meden-Inmed, sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 KOSZALIN
Tel.: +48 94 347-10-40
Fax: +48 94 347-10-41
E-Mail: meden@meden.com.pl

ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Dieses Erzeugnis darf von Personen genutzt werden, die sich mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut gemacht haben.
2. Unsachgerechte Nutzung, unsachgerechter Betrieb und Service, die von dieser Betriebsanleitung abweichen ist untersagt und kann Schäden verursachen, für die der Nutzer haftet. Die Haftung des Herstellers im Falle von unsachgerechter Nutzung und unsachgerechtem Betrieb und Service ist ausgeschlossen.
3. Jegliche technische Veränderung des Erzeugnisses ist untersagt.
4. Sollten Sie feststellen, dass die Funktionsweise und Parameter dieses Erzeugnisses von dieser Betriebsanleitung abweichen, unterlassen Sie bitte die Nutzung dieses Erzeugnisses und kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller oder den Lieferanten.
5. Sämtliche Reparaturen sind lediglich von einer werkseigenen Servicewerkstatt oder einer zugelassener Vertragswerkstatt durchzuführen und auf dem Garantieschein beigefügten Blatt zur Eintragung von Reparaturen vermerkt werden. Verstöße gegen die obige Verpflichtung haben den Verfall der Garantie zur Folge.
6. Bei Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Herstellervorgaben und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung verlieren die Garantiebedingungen ihre Gültigkeit.
7. Die technische Beschreibung mit dem Ersatzteilkatalog und der Anleitung zum Austausch von Ersatzteilen erhalten Sie auf Ihren Wunsch vom Hersteller.
8. Nutzen Sie ausschließlich den vom Hersteller genannten bzw. gelieferten Zubehör.

2. Bestimmung der Laufhilfe

Die krankengymnastische Laufhilfe MOVITA FITS ist für die Rehabilitation und Lauftraining unter der Aufsicht von qualifiziertem Personal in medizinischen Einrichtungen bestimmt. Die krankengymnastische Laufhilfe erfüllt die Bedürfnisse von sowohl behinderten Kindern als auch Erwachsenen, deren selbständige Mobilität unterstützt werden muss. Die Laufhilfe MOVITA FITS unterstützt die Anschlussheilbehandlung von Patienten mit neurologischen und orthopädischen, Erkrankungen, hilft bei Gleichgewichtsstörungen und unterstützt den Kreislauf. Diese Laufhilfe ist für Personen, die sich in der aufgerichteten Körperhaltung unsicher fühlen und bei ihrer Mobilität Hilfe brauchen, bestimmt. Der verstellbare Sitz und das Brustkorbunterstützungssystem helfen bei aufrechter Körperhaltung des Patienten. Die Laufhilfe ist für die Unterstützung der krankengymnastischen Laufschulung und als Mobilitätshilfe für Behinderte bestimmt.

2.1 Indikationen

- neurologische und orthopädische Erkrankungen;
- Kreislaufstörungen;
- Gleichgewichtsstörungen.

2.2 Kontraindikationen

- Traumata und Dysfunktionen im Bereich oberen Extremitäten, die die Nutzung der Armlehne ausschließen sowie einige Störungen im Bereich der unteren Extremitäten.

2.3 Verwendung

Die Laufhilfe MOVITA FITS ermöglicht:

- die Unterstützung des selbständigen Laufs;
- die Anregung des Laufmusters;
- die Unterstützung der aufrechten Körperhaltung;
- den Lauftraining;
- selbständige Fortbewegung;
- Entwicklung der Wahrnehmung, räumlicher Einschätzung und Mobilität.

3. Technische Daten

Die Laufhilfe MOVITA FITS wurde aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen, Edelstahlgriffen, die mit Schaumstoff von entsprechender Dichte beschichtet worden sind, hergestellt. Der volle Sitz besteht aus einem Schaumstoff von entsprechender Dichte. Die Räder sind aus Vollgummi von entsprechender Härte, der auf dem Bodenbelag keine Spuren hinterlässt. Die Hinterräder wurden mit Bremsen und die drehenden Vorderräder mit einer Richtungssperre ausgerüstet. Die Laufhilfe wurde besitzt gepolsterte Verkleidungen aus Öko-Leder, die den Körper von zufälligen Stößen bzw. Hautabschürfungen schützen.

3.1 Technische Kenndaten

Die technischen Parameter der Laufhilfe MOVITA FITS wurden in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

MOVITA FITS	
Länge [mm]	1030
Breite [mm]	780
Höhe [mm]	980 - 1680
Gewicht [kg]	36
Gewicht in der Transportverpackung [kg]	60
Max. Nutzergewicht [kg]	135

Genauigkeit der Maße +/- 10 mm

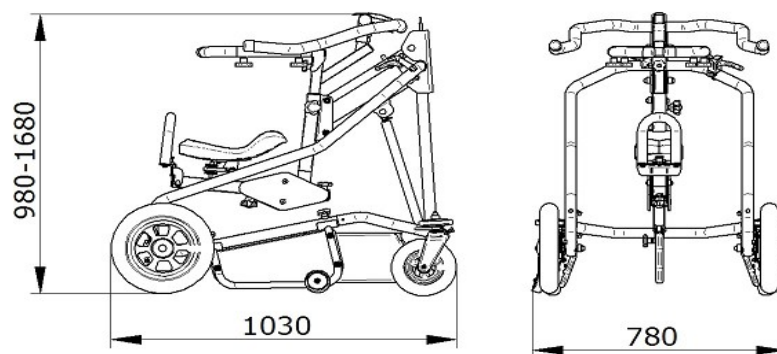


Abb. Nr. 1 Abmessungen der Laufhilfe MOVITA FITS

3.2 Einstellbereiche








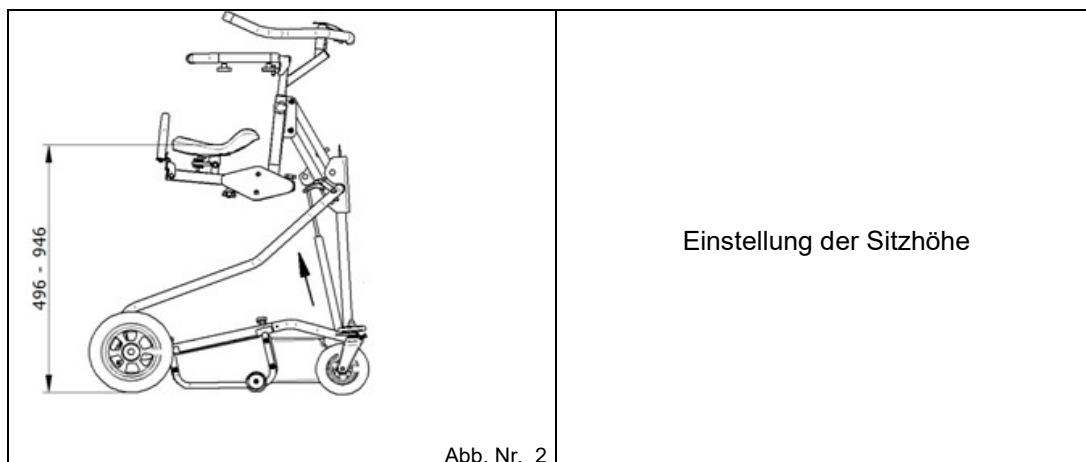


Abb. Nr. 2

Einstellung der Sitzhöhe

 <p>845 - 1024</p> <p>Abb. Nr. 3</p>	<p>Höheneinstellung der Brustkorbunterstützung</p>
 <p>974 - 1068</p> <p>Abb. Nr. 4</p>	<p>Höheneinstellung der Armlehne</p>
 <p>Abb. Nr. 5</p>	<p>Einstellung der Lage der Armlehne</p>
 <p>205 - 275</p> <p>Abb. Nr. 6</p>	<p>Höheneinstellung der Trennwand</p>
 <p>175 - 255</p> <p>Abb. Nr. 7</p>	<p>Möglicher Vorschub des Sitzes</p>

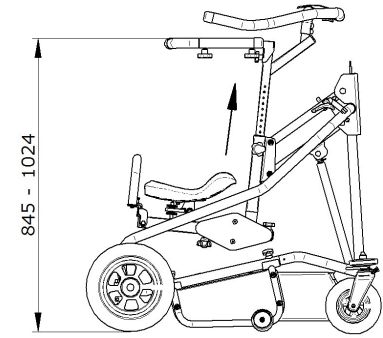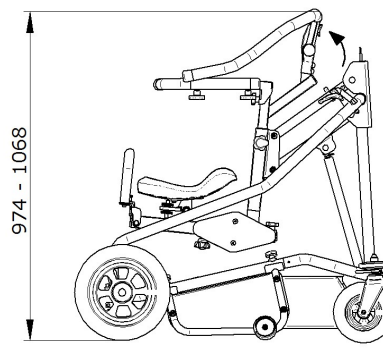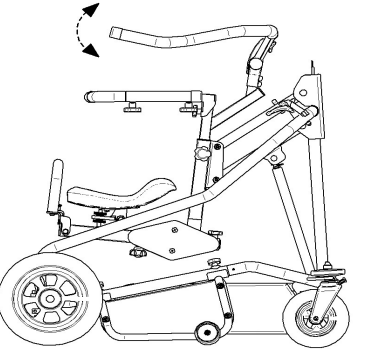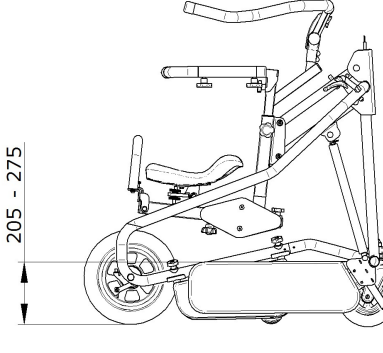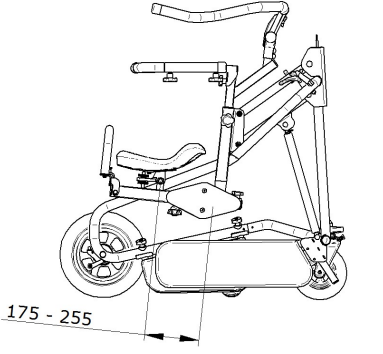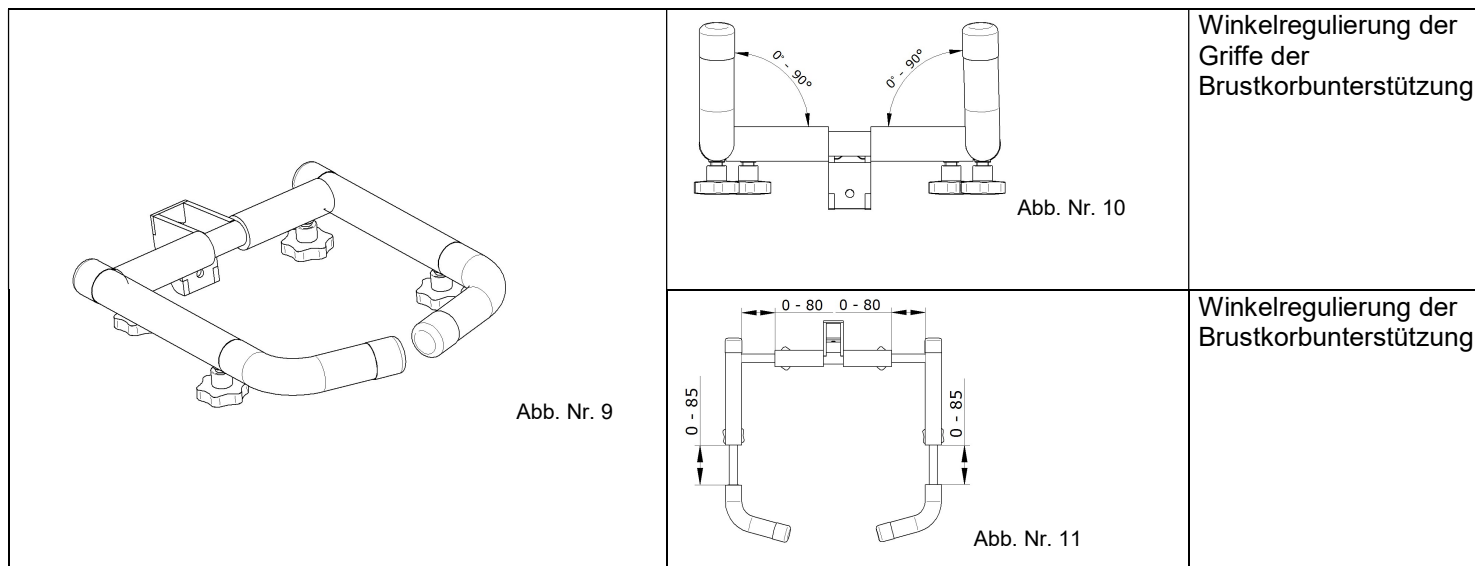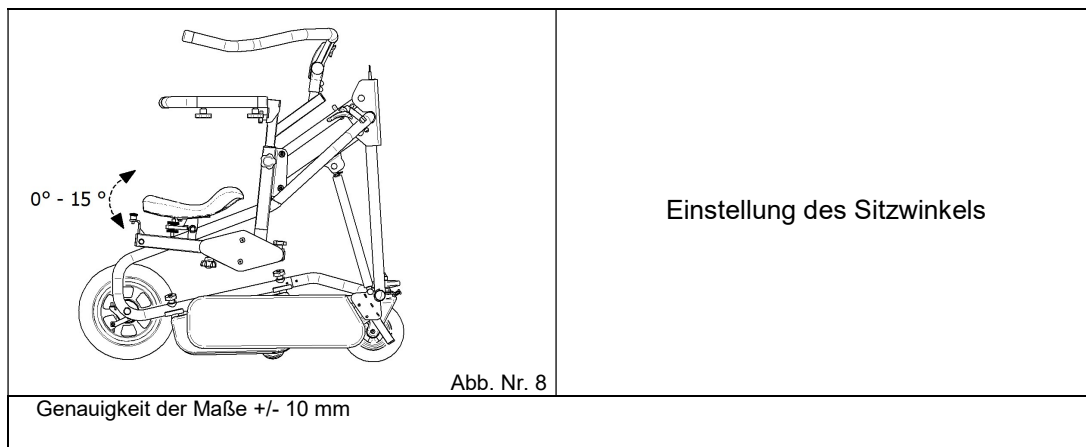

4. Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- Die Laufhilfe MOVITA FITS
- Seitenverkleidungen (linke und rechte Seitenverkleidung)
- Bedienungsanleitung

Bei Abholung der Laufhilfe prüfen Sie den Lieferumfang.


5. Konstruktion und Funktionsweise



WICHTIGER HINWEIS

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen der Konstruktion vorzunehmen, durch die die grundlegenden Anforderungen hinsichtlich der Funktionsweise und Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Zeichnungen dienen lediglich der Veranschaulichung und haben einen Orientierungscharakter.

Krankengymnastische Laufhilfe MOVITA FITS besteht aus:

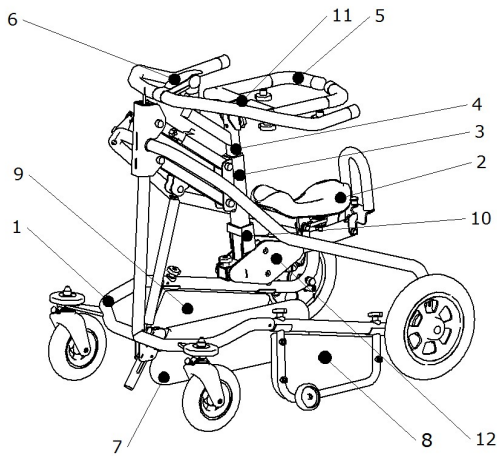

1. unterer Rahmen
2. Sitzbaugruppe
3. Baugruppe der Hauptstütze
4. Stütze der Sitzbaugruppe
5. Bruskorbunterstützungssystem
6. Armlehnenbaugruppe
7. Trennwandbaugruppe
8. linke Seitenverkleidung
9. rechte Seitenverkleidung
10. untere Sitzverkleidung
11. obere Verkleidung der Brustkorbunterstützung
12. Mittelverkleidung

Abb. Nr. 12

5.1 Kennzeichnung



Die Laufhilfe MOVITA FITS wurde in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen für Medizinprodukte (Klasse 1, Regel 1) hergestellt und besitzt entsprechend der Erklärung des Herstellers die CE-Kennzeichnung

5.2 Symbole

Verstellvorrichtungen und andere Teile des Gerätes wurden mit folgenden Symbolen, deren Bedeutung nachstehend wie folgt erläutert wird, versehen:

	<p>Warnzeichen. Mit diesem Zeichen wird auf Tätigkeiten aufmerksam gemacht, deren unsachgerechte Ausführung, mit einer Verschlechterung der Nutzung einhergehen oder eine Gefährdung der Sicherheit des Nutzers u./od. des Personals, das die Laufhilfe bedient, verursachen kann. Gleiches Symbol wurde auch an bestimmten Stellen des Gerätes angebracht, an denen die Befolgung der Bedienungsanleitung während der Nutzung des Gerätes unbedingt erforderlich ist.</p>
	<p>Befolgen Sie die Bedienungsanleitung</p>
	<p>Hersteller</p>
	<p>Maximale zulässige Betriebsbelastung</p>

6. ALLGEMEINE WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

6.1 Einsatzort



WICHTIGER HINWEIS!

Dieses Gerät ist in Gegenwart und unter Aufsicht vom qualifizierten Personal zu nutzen.



WICHTIGER HINWEIS!

Die Laufhilfe darf nicht auf Unebenheiten z.B. Neigungen, Treppen usw. genutzt werden.



WICHTIGER HINWEIS!

Lassen Sie die Laufhilfe nie auf einer steilen Neigung oder unebenen Boden unbeaufsichtigt stehen.



WICHTIGER HINWEIS!

Die maximale zulässige Neigung bei der Nutzung der Laufhilfe beträgt 5°. Im Falle von Neigungen 3-5° ist die Hilfestellung von zwei Personen des medizinischen Personals erforderlich.

6.2 Nutzungshinweise

- Vor dem Gebrauch dieses Gerätes prüfen Sie, ob sich in dem Nutzungsbereich keine Hindernisse wie Treppen, Stufen, Löcher oder auf dem Boden liegende Gegenstände befinden, die das Umfallen der Laufhilfe MOVITA FITS samt dem Patienten verursachen könnten.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Bremsen, die Abnutzung der Räder und ob sonstige Teile fest angeschraubt und nicht lose geworden sind.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Befestigungsteile fest angeschraubt sind.
- Beim Halten ist die Bremse immer zu blockieren.
- Vor jeder Einstellung ist die Bremse zu blockieren.
- Zur Gewährleistung der sachgerechten Nutzung und Funktionsfähigkeit muss ausreichender Raum für freie und ungehinderte Bewegung gewährleistet werden.
- Beim Loslassen der Gasdruckfeder zur Einstellung des Sitzes sollten der Patient bzw. ein anderer Nutzer darauf achten, nicht gegen den Haltegriff anzustoßen.

7. BEDIENUNG DER LAUFHILFE MOVITA FITS

Die Funktionsweise der Laufhilfe MOVITA FITS ist sehr einfach und sicher. Die Mobilität von Patienten mit Gleichgewichtsstörungen wird mit Hilfe des Unterstützungssystems gefördert, wobei sich die Patienten auf Rädern mit eigener Kraft bewegen.

Trotz sicherer Funktionsweise und einfacher Bedienung muss vor Gebrauch die Funktionsweise durch den Verkäufer bzw. Therapeuten erklärt werden.

7.1 Regulierung der Laufhilfe MOVITA FITS



WICHTIGER HINWEIS!

Während der Nutzung der Laufhilfe darf weder die Laufhilfe eingestellt werden noch dürfen Tätigkeiten in Bezug auf Instandhaltung und Wartung durchgeführt werden.

7.2 Höheneinstellung der Brustkorbunterstützung



Abb. Nr. 13

Um die Höhe der Brustkorbunterstützung einzustellen, ziehen Sie und drehen den Drehknopf, siehe Abb. Nr. 13. Sobald die angestrebte Höhe erreicht wird, drehen sie erneut den Drehknopf fest und sichern die gewünschte Lage. Die richtige Höhe der Brustkorbunterstützung sollte an die Achselhöhlen des Patienten angepasst werden.

Die Einstellung erfolgt nach Stufen. Die maximale zulässige Ausschubung wurde mit einem roten Streifen gekennzeichnet.

7.3 Brustkorbunterstützung



Abb. Nr. 14

Die Griffe der Brustkorbunterstützung sind von 0° bis 90° einstellbar (siehe Abb. Nr. 14).

7.4 Sitz



Abb. Nr. 15

Der Sitzwinkel ist mit Hilfe von Drehschrauben einstellbar (Abb. Nr. 15). Lösen Sie die Schrauben, stellen Sie den Sitz in den gewünschten Winkel und sichern Sie die Lage, indem Sie die Schrauben fest anziehen.

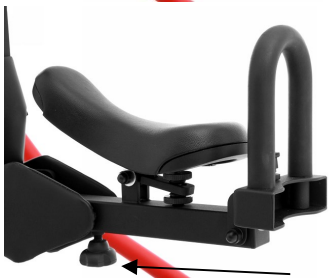


Abb. Nr. 16

Der Vorschub der Sitzbaugruppe erfolgt nach Stufen mit Hilfe eines Drehknopfes. (Abb. Nr. 16). Der maximale zulässige Vorschub wurde mit einem roten Streifen gekennzeichnet.



Abb. Nr. 17

Die Lehne des Sitzes kann gesenkt werden, indem die Schnappsperre angehoben wird. (Abb. Nr. 17).



Abb. Nr. 18

Die Abbildung einer gesenkten Lehne (Abb. Nr. 18)

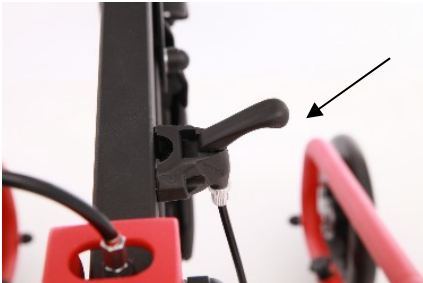


Abb. Nr. 19

Um die Höhe des Sitzes einzustellen, heben Sie den Hebel (Abb. Nr. 19) und drücken Sie den Hebel nach unten nachdem Sie die gewünschte Höhe erreicht haben (Abb. Nr. 20).



Abb. Nr. 20

7.5 Armlehnenriff



Abb. Nr. 21

Der Armlehnenriff wird mit einer Klemmeinrichtung befestigt. Um die gewünschte Höhe des Armlehnenriffes zu erreichen, lösen Sie die Klemmeinrichtung, indem Sie die Klemmeinrichtung nach unten drücken und dann wieder anheben (Abb. Nr. 21) nach Erreichung der gewünschten Höhe heben Sie erneut die Klemmeinrichtung (Abb. Nr. 22). Gleichzeitig kann der Winkel des Armlehnenriffes eingestellt werden.



Abb. Nr. 22

7.6 Bremseinrichtung



Abb. Nr. 23

Die Laufhilfe stoppen Sie indem Sie den Bremshebel betätigen (Abb. Nr. 23). Der Bremshebel ist mit einem Sperr-System ausgestattet.

7.7 Stütze der Sitzbaugruppe



Abb. Nr. 24



Abb. Nr. 25

Abbildung der Stütze der Sitzbaugruppe ohne Verkleidung (Abb. Nr. 24) und die Abbildung der Stütze der Sitzbaugruppe mit Verkleidung (Abb. Nr. 25).



Abb. Nr. 26



Abb. Nr. 27

Abbildung der Stütze der Sitzbaugruppe mit Verkleidung für die Montage der Sitzbaugruppe (Abb. Nr. 26). Abbildung der bereits montierten Sitzbaugruppe (Abb. Nr. 27)

7.8 Trennwand

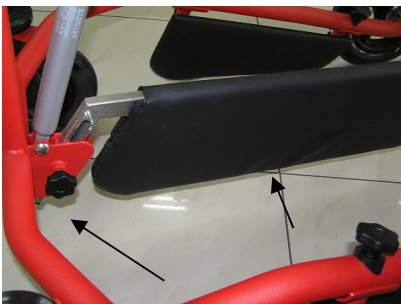


Abb. Nr. 28

Bei Patienten, die die Tendenz aufweisen, die Beine zu kreuzen, ist die Trennwand erforderlich (Abb. Nr. 28). Die Höhe der Trennwand kann mit einem Drehknopf eingestellt werden. Um die Trennwand zu demontieren entfernen Sie ganz den Drehknopf.

7.9 Seitenverkleidungen



Abb. Nr. 29



Abb. Nr. 30

Die Seitenverkleidungen sind mit Hilfe von Drehknöpfen zu demontieren (Abb. Nr. 29 und 30).

7.10 Vorderräder



Abb. Nr. 31

Die Fahrrichtung der Vorderräder kann durch die Anziehung der Klemmsperre blockiert werden (Abb. Nr. 31).

7.11 Verkleidung der Brustkorbunterstützung



Rys nr 32

7.11 Verkleidung der Brustkorbunterstützung (Abb. Nr. 32).

8. Vorbereitende Tätigkeiten

Nachdem Sie die Lauffhilfe aus der Transportverpackung herausgenommen haben, ist sie betriebsbereit. Montieren Sie die Seitenverkleidungen, falls erforderlich.

9. Technische Betriebsbedingungen

9.1 Haftung des Herstellers

Die voraussichtliche Nutzungsdauer beträgt 7 Jahre.

Die Haftung des Herstellers für die Mängel des Erzeugnisses (und seines Zubehörs) und deren Folgen ist nach Ablauf von 7 Jahren ab Herstellungsdatum ausgeschlossen. Die Haftung des Herstellers für Folgen unsachgemäßer Montage, falscher Diagnose, unsachgemäßer Nutzung des Erzeugnisses und seines Zubehörs, falscher Auslegung und Nichtbefolgung der Betriebsanleitung, Folgen von durch unbefugte Personen durchgeführten Reparaturen ist ausgeschlossen.

9.2 Reinigung der gepolsterten Flächen

Bei der Reinigung der gepolsterten Flächen verfahren Sie wie folgt:

- reinigen Sie regelmäßig die Flächen mit einer Lösung eines sanften Reinigungsmittels (z.B. Seife) mit Hilfe eines feuchten weichen Lappens oder eines Schwamms;
- stark verschmutzte Stellen reinigen Sie mit einer weichen Bürste;
- nach der Reinigung trocknen Sie die Flächen mit einem trockenen weichen Lappen;
- Flecken und Verschmutzungen (Kugelschreiber, Lippenstift, Druckfarbe etc.) reiben Sie unverzüglich mit einem Lappen.

Die zugänglichen Stellen der Polsterung und der Konstruktion können mit einem Mittel wie Incidin Foam (im Angebot der Meden-Inmed) desinfiziert werden.

Benutzen Sie keine der nachfolgend genannten Mittel:

- Pasten, Wachs, Sprays
- starke Reinigungsmittel, Lösungsmittel, lösungshaltige und alkoholhaltige Reinigungsmittel, Reinigungsmittel für natürliches Leder.

Der Gebrauch von den vorstehend genannten Mitteln kann Verhärtung und Platzen des Bezugs sowie die Veränderung der äußeren Erscheinung – Glanzveränderung verursachen und ist von der Garantie ausgeschlossen.

Desinfektion mit den UV-Strahlen verursacht keine Beschädigung der gepolsterten Flächen.

9.3 Instandhaltung der Tragkonstruktion

Metallteile der Konstruktion sind mit einem weichen und feuchten Lappen zu reinigen. Trocknen Sie nach jeder Reinigung die Flächen. Benutzen Sie keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel.

Alle beweglichen Verbindungen schmieren Sie alle sechs Monate oder wenn laute Geräusche während des Betriebs auftreten ein.

Benutzen Sie marktübliche eindringende Schmierstoffe. Vermeiden Sie den Kontakt mit gepolsterten Flächen, und entfernen Sie übermäßig aufgetragene und herauslaufende Schmierstoffe unverzüglich mit einem trockenen Lappen.

Regelmäßig – alle sechs Monate – überprüfen Sie die Gewindeverbindungen.

Alle losen Verbindungen, die nicht beseitigt werden können, melden Sie dem Service des Herstellers unterlassen Sie in der Zeit, bis die Ursache aufgehoben worden ist, die Nutzung der Laufhilfe.

9.4 Prüfung der Gasdruckfeder

Die Laufhilfe MOVITA FITS ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, mit der die Höhe der Sitzbaugruppe eingestellt werden kann. Alle drei Monate prüfen Sie die Gasdruckfeder. Jegliche Verschlechterung der Funktionsfähigkeit der Gasdruckfeder oder jeglicher Ausfluss muss unverzüglich dem Service von Meden-Inmed gemeldet werden.

9.5 Service Kontakt

Meden-Inmed, spółka z o.o., 75-847, Koszalin, ul. Wenedów 2, Tel. +4894 341048 (3471050); +48 600-052-584; E-Mail: rm@meden.com.pl.

Falls Sie das Erzeugnis von einem Wiederverkäufer erworben haben, bitte teilen Sie uns die Seriennummer und den Einsatzort des Gerätes mit. Diese Daten werden in unserer Service-Datenbank gespeichert und werden uns schnelle Vorgehensweise zur Erfüllung der Garantiebedingungen und einen schnellen Service ermöglichen.

10. Lagerung und Transport

Der Transport und Lagerung der Laufhilfe hat in der Transportverpackung des Herstellers zu erfolgen. Der zulässige Temperaturbereich beim Transport beträgt von -10°C bis 45°C, dagegen die Lagerung findet im Temperaturbereich von +5 °C bis +45°C an einem trockenen und überdachten Ort statt.

Bedingungen der Umgebung (Temperatur, relative Feuchtigkeit, Luftdruck)	Lagerung	+5°C bis +45°C, max. 75% ohne Kondenswasser, 700-1060 hPa
	Transport	-10°C bis +45°C, von 20% bis 95% ohne Kondenswasser, 700-1060 hPa

11. Garantieschein

1. Die Gesellschaft Meden-Inmed sp. z o.o. erteilt eine Garantie von 24 Monaten für die gelieferte Laufhilfe und eine Garantie von 12 Monaten für dieses Gerät. Die Garantie beginnt mit dem Tag des Verkaufs, der durch einen Verkaufsbeleg nachgewiesen werden kann.
2. Die Gesellschaft Meden-Inmed sp. z o.o. haftet im Rahmen der erteilten Garantie für quantitative und qualitative Mängel, die unmittelbar nach der Entfernung der Verpackung des Erzeugnisses beim Abnehmer festgestellt worden sind. Der Abnehmer ist verpflichtet, binnen 2 Werktagen schriftlich die festgestellten quantitativen Mängel dem Hersteller anzuzeigen.
3. Zu der Erbringung der Serviceleistungen im Rahmen der Garantie sind ausschließlich der Service der Meden-Inmed sp. z o.o. oder von Meden-Inmed sp. z o.o. bevollmächtigte Einrichtungen berechtigt.
4. Die Verlängerung der im Rahmen der Garantie durchgeführten Reparatur über 3 Tage hinaus, unabhängig von der Ursache, hat die Verlängerung der Garantiefrist um die gesamte Dauer des reparaturbedingten Ausfalls des gelieferten Erzeugnisses zur Folge.
5. Wird eine bestimmte Baugruppe bereits zwei Mal repariert, ist beim dritten Mal der Garant verpflichtet, die mangelhafte Baugruppe auszutauschen. Alle bei der Reparatur ausgetauschten Baugruppen / Teile bleiben das Eigentum der Servicewerkstatt.
6. Unter der Androhung des Garantieverlustes ist der Nutzer verpflichtet, ordnungsgemäße Instandhaltung des Gerätes und der Anlage zu gewährleisten.
7. Von der Garantie sind Mängel ausgeschlossen, die auf den natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, d.h. einem Verschleiß, der nicht durch mangelhaften Stoff oder mangelhaften Ausführung verursacht worden ist. Die auf ausbleibende Instandhaltung (z.B. Ventile, Lager, Führungsschienen, Belüftung) zurückzuführenden Mängel sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
8. Von der Garantie sind Stoffe und Betriebsteile (z.B. Dichtungen, Kabel, Anschlussleitungen) ausgeschlossen.
9. Die Meden-Inmed sp. z o.o. haftet nicht für die Sicherheit des Nutzers bzw. Patienten während des Betriebs eines angeschlossenen Gerätes, wenn Verstöße gegen die Vorgaben der gelieferten Montage- und Betriebsanleitung vorliegen.
10. Der Nutzer trägt das Risiko in Verbindung mit der Nutzung des Gerätes, für das die Garantie erteilt worden ist. Die Meden-Inmed sp. z o.o. übernimmt aufgrund der Garantie für eventuellen Verdienstaustausch und Kosten aufgrund der Nutzung od. ausbleibender Nutzung des Gerätes keine Haftung.

11. Sämtliche Störungen während der Garantielaufzeit, die nicht in Schriftform (Brief, Telefax, Mail) angezeigt worden sind, werden von der Garantie ausgeschlossen.
12. Kosten aufgrund einer unbegründeten Störungsmeldung fallen zu Lasten des Nutzers.
13. Von der Garantie sind folgende Geräte ausgeschlossen:
 - Geräte mit entfernten oder beschädigten Seriennummern und Plomben;
 - Geräte, die in Folge eines unsachgemäßen von dem Inhalt der Betriebsanleitung abweichenden Betriebes beschädigt worden sind;
 - Geräte, die selbständig repariert oder durch unbefugte Personen technisch verändert worden sind;
 - Geräte, die mechanisch (z.B. während eines unsachgemäßen Transportes) beschädigt worden sind;
 - Beschädigungen durch Feuer, Gewitter und sonstige zufällige Ereignisse.
14. In Falle des Verkaufs des Gerätes während der Garantiefrist werden zusätzliche Garantiescheine nicht ausgestellt.
15. Eine Zweitausfertigung des Garantiescheins kann nicht erstellt werden.
16. Im Falle eines Privatverkaufs werden die Rechte des Käufers aufgrund der Abweichung der Ware von dem Kaufvertrag durch diese Garantie weder ausgeschlossen, beschränkt noch vorläufig eingestellt.

Das Gerät ist für einen Wiedereinsatz geeignet.

<i>Krankengymnastische Laufhilfe MOVITA FITS Seriennummer:</i>	
<i>Datum und Unterschrift des Garanten:</i>	

