

Euroflex – Arbeitsstühle

Serie 400

Bedienungsanleitung / Einstellmöglichkeiten

Inhaltsangabe:

	Seite:
- Einstellung der Rückenlehne	2
- Einstellung der Aktivlage (Sitzwinkel)	2
- Einstellung der Armlehnen	3
- Sitzhöhenverstellung	3
- Benutzung der Drehvorrichtung (Zubehör)	3
- Einstellen von Arthrodesensitzen	4
- Einstellung des Bremshebels	4
- Elektrische Sitzhöhen-/Sitzwinkelverstellung	5
- Laden der Batterie bei Elektrostühlen	5
- Wartung und Pflege	6
- Technische Daten	7
- Garantie	7

Der Euroflex – Arbeitsstuhl bietet auf Grund seiner flexiblen Konstruktion die Möglichkeit, ihn mit einem umfangreichen Sortiment an Zubehör auszustatten oder nachzurüsten.

Jeder Euroflex – Arbeitsstuhl wird vor Lieferung kontrolliert und getestet. Sollte irgend etwas an Ihrem Stuhl nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren direkten Lieferanten.

Ein defekter Stuhl darf **NICHT BENUTZT** werden. Bei Reparaturen oder Austausch von Teilen dürfen ausschließlich Originalteile von Euroflex verwendet werden, die durch einen autorisierten Fachhändler durchgeführt werden müssen.

Bei Verwendung anderer Teile übernimmt Euroflex keine Verantwortung für Funktion und Sicherheit.

Im Falle von Reklamationen geben Sie bitte immer die auf dem Stuhl befindliche Herstellungsnummer an.



Einstellung der Rückenlehne

Abb.1 = Arbeitsstuhl mit niedriger Rückenlehne


Abb.2 = Arbeitsstuhl mit hoher Rückenlehne

Die niedrige Rückenlehne ist beweglich und paßt sich beim Zurücklehnen der Rückenhaltung automatisch an.


Durch Lösen und anschließendes Festdrehen der Handstellräder werden folgende Einstellungen ermöglicht:

C = Höhenverstellung

A = Sitztiefenverstellung

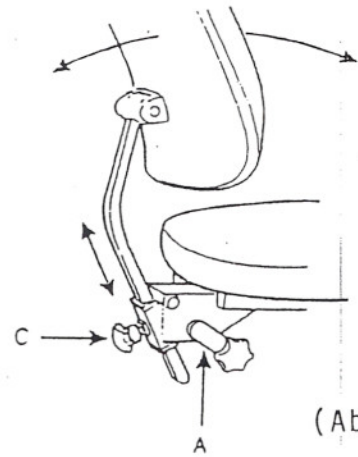

(Abb. 1)

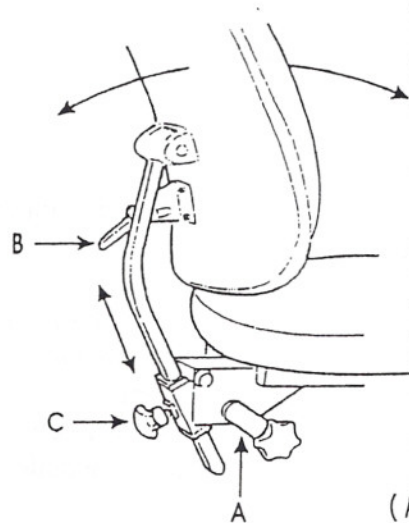

(Abb. 2)


Die hohe Rückenlehne (Abb.2) kann zusätzlich durch eine Flügelschraube B in ihrem Winkel verstellt und fixiert werden.

Einstellung der Aktivlage (Sitzwinkel)

Die Sitzwinkelverstellung (bis ca. 17 Grad nach vorne stufenlos verstellbar) kann an dem Handstellrad A vorgenommen werden.

Sicherheitshinweis


Achten Sie darauf, daß beim Lösen des Handstellrades A der Sitz frei beweglich ist. Aus Sicherheitsgründen sollte diese Verstellungen nur vorgenommen werden, wenn sich der Benutzer nicht auf dem Stuhl befindet.

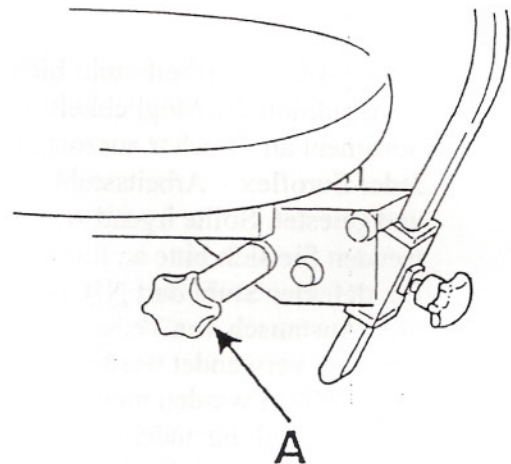

(Abb. 3)

Einstellung der Armlehnen (Abb.4)


A = Höheneinstellung der Armlehnen
B = Breiteneinstellung der Armlehnen

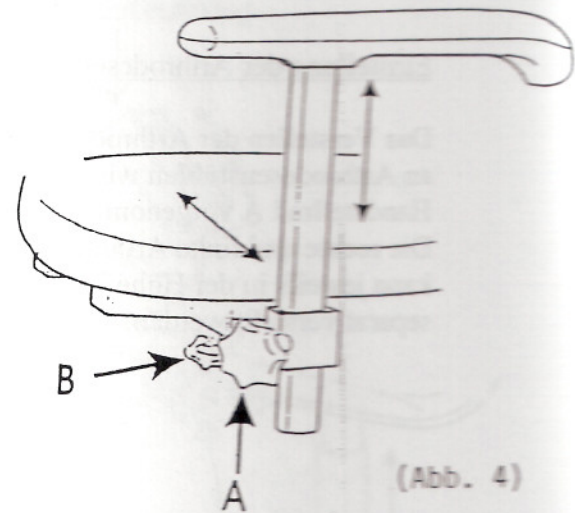

(Abb. 4)

Einstellung der Sitzhöhe mittels Gasfeder (Abb.5)


Die Verstellung der Sitzhöhe erfolgt über den Hebel der Gasdruckfeder A (nur bei Serie 440), der sich rechts unterhalb des Sitzes befindet. Um den Sitz nach oben zu verstellen, wird der Hebel bis zum Anschlag hoch gezogen. Gleichzeitig ist die Belastung von Körpergewicht auf die Sitzfläche zu verringern. **(Vorher durch Betätigen der Feststellbremse den Stuhl gegen wegrollen sichern.)**

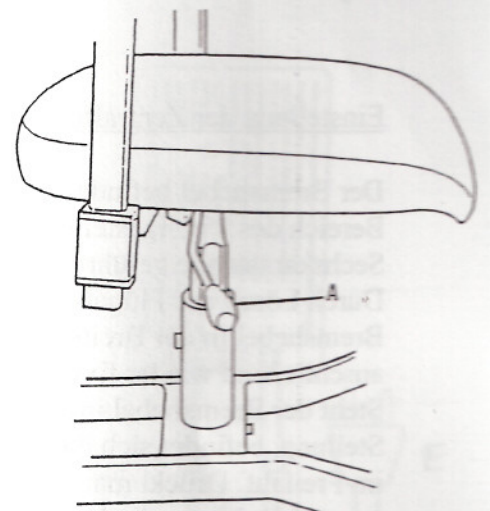

(Abb. 5)

Stühle mit Drehvorrichtung (Abb.6)

Eine Drehbarkeit der Sitzfläche (Zubehör) erfolgt durch Herunterdrücken des Hebels A (befindet sich auf der linken Seite unterhalb der Sitzfläche). Durch Hochziehen des Hebels A kann die Sitzfläche per 90 Grad Drehung in Rechts-, Geradeaus- und Linksstellung wieder fixiert (justiert) werden.

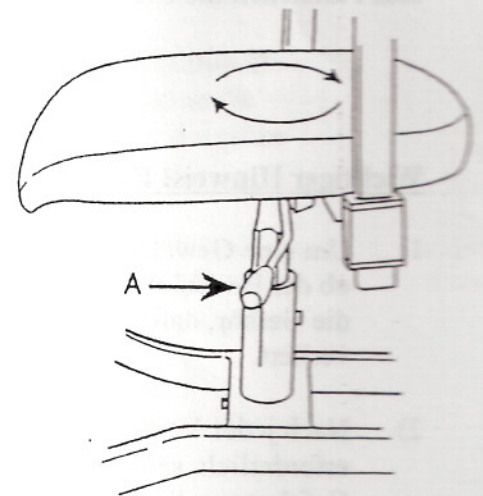


(Abb. 6)

Einstellung der Arthrodesenklappen (Abb.7)

Das Verstellen der Arthrodesenklappen an Arthrodesenstühlen wird an dem Handstellrad A vorgenommen.

Die rechte und linke Arthrodesenklappe kann jeweils in der Höhe bzw. im Winkel separat verstellt werden.

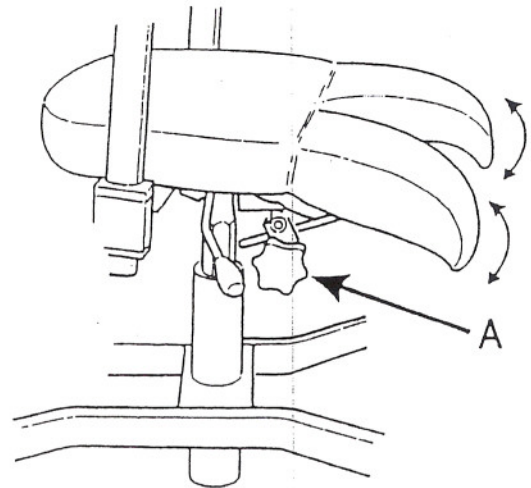


(Abb. 7)

Einstellung der Zentralfeststellbremse (Abb.8)

Der Bremshebel befindet sich im hinteren Bereich des Untergestells und wird auf einer Sechskantstange geführt.

Durch Lösen der Flügelschraube C kann der Bremshebel in der Breite verstellt und anschließend wieder fixiert werden.

Steht der Bremshebel in senkrechter Stellung, befindet sich das hintere Räderpaar im Freilauf. Drückt man den Bremshebel nach vorne, blockieren die Hinterräder. Da der Euroflexstuhl über sehr leichtgängige Räder verfügt, ist es zu empfehlen, daß vor dem Hinsetzen oder Aufstehen die Bremse betätigt wird.

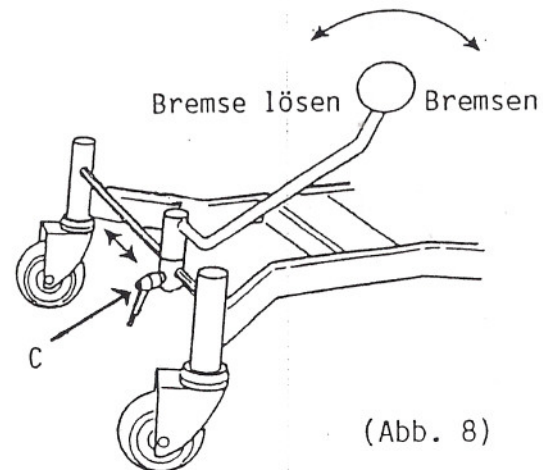

(Abb. 8)

Wichtiger Hinweis! Bitte beachten.


- 1) Um eine Gewährleistung der Bremsfunktion zu erreichen, kontrollieren Sie bitte, ob der Boden eben, trocken und rutschfest ist. Sollte dies nicht zutreffen, besteht die Gefahr, daß trotz festgestellter Bremse das Untergestell seine Standfestigkeit verliert.
- 2) Nach jeder Veränderung der beschriebenen Einstellmöglichkeiten ist es unbedingt erforderlich, sämtliche Handstellräder wieder fest anzuziehen, um somit mögliche Gefahrenquellen, die durch eine Belastung entstehen können, zu vermeiden.
- 3) Die Zentralfeststellbremse ist eine Standbremse und darf nur in unbewegtem Zustand angezogen werden. Sie darf nicht dazu benutzt werden, den Stuhl bei rollendem (bewegtem) Zustand abzubremsen.

Stühle mit elektrischer Höhenverstellung Serie 490 / 490 – JEA (Abb. 9 und Abb.10)


Nach Erhalt eines neuen Euroflex – Arbeitsstuhles mit elektrischer Höhenverstellung muß folgendes beachtet werden:

Stecken Sie den Stecker A der Handsteuerung in die vorgesehene Einsteckbuchse C des Platinengehäuses. Zum Verstellen der Sitzhöhe betätigen Sie den Taster 1 für Aufwärts oder 2 für Abwärts.

Stühle mit elektrischer Sitzwinkelverstellung (490 – JEA) werden durch einen Kippschalter 1 Auf – und Abwärts verstellt. Kippschalter 2 betätigt die elektrische Sitzwinkelverstellung.

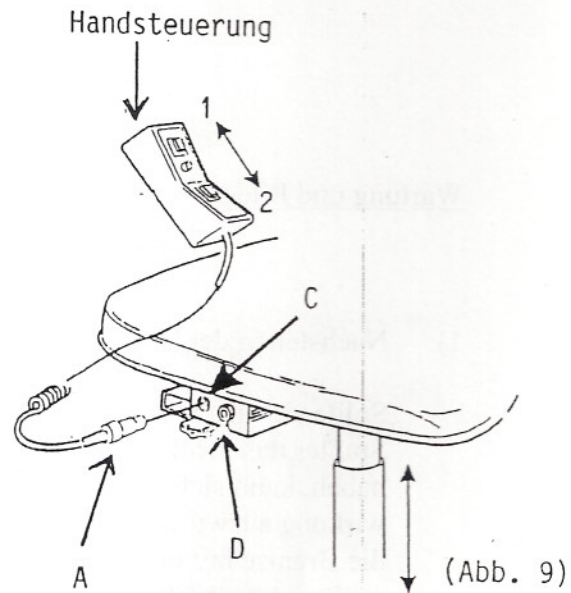

(Abb. 9)

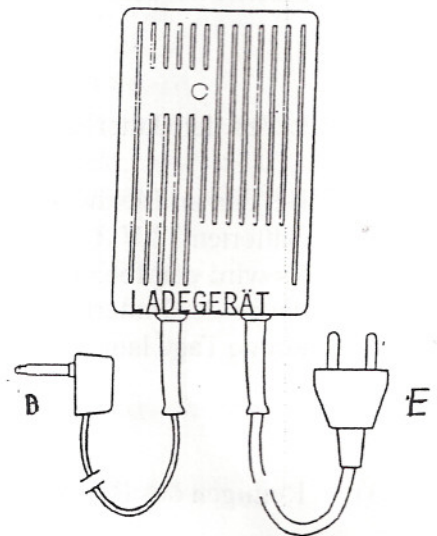

(Abb. 10)

Laden der Batterie

Stecken Sie den Klinchstecker B (Abb.10) des Ladegerätes in die Ladebuchse D (Abb.9) am Stuhl. Anschließend wird der Netzstecker E des Ladegerätes an die Netzsteckdose angeschlossen. Der Akku hat volle Ladung erreicht, wenn die grüne Leuchtdiode am Ladegerät kaum mehr Licht erzeugt.


Das Ladegerät hat einen Überladeschutz, so daß bei voller Kapazität der Batterie-ladung das Gerät auf Erhaltungsladung schaltet. Dadurch wird eine Beschädigung des Akkus vermieden, auch wenn über einen längeren Zeitraum hinaus geladen wird.

Siehe jedoch separate Bedienungsanleitung des mitgelieferten Ladegerätes.

Wartung und Pflege:

1) Nachstellen der Bremsen (Abb. 11)

Sollte sich nach längerer Benutzung des Stuhles das Profil der Räder abgenutzt haben, kann sich dies auf die Bremswirkung auswirken. In diesem Fall kann die Bremse mit einem 3 mm Inbuschlüssel an der Stiftschraube nachgestellt werden.

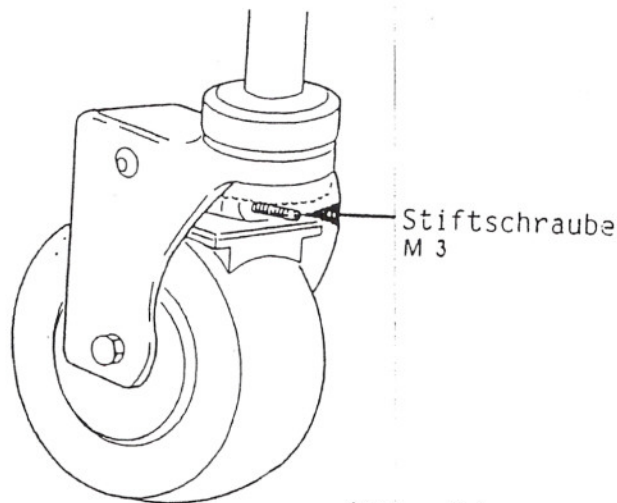

(Abb. 11)

2) Laden der Batterie

Bei den an Elektrostühlen befindlichen Akkus handelt es sich um gasdichte Blei-Batterien 12 V, 6,5 Ah. Für diese Akkus ist keine besondere Wartung erforderlich. Es wird empfohlen, diese Akkus regelmäßig zu laden (täglich). Um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten, empfehlen wir jedoch diese Batterie ab und zu einige Tage lang nicht an das Ladegerät anzuschließen.

3) Reinigen des Bezugstoffes

Der Euroflex – Arbeitsstuhl wird serienmäßig mit einem sehr strapazierfähigen, schwer entflammarem Trevirastoff geliefert. Dieser Stoff kann mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abgewaschen werden. Bitte keine Allzweckreiniger oder aggressive Mittel verwenden.

Technische Daten:

Plazierung des Schildes mit Serien – Nr. und CE – Zeichen	: Sitzkreuz
Maximale Belastbarkeit	: 125 Kg
Stuhlgewicht 442	: 22 Kg
Stuhlgewicht 492 (elektrisch)	: 28 Kg
Stuhlgewicht 492 – JEA (elektrisch)	: 30 Kg
Untergestell Breite x Länge	: 48 x 53 cm (Aluminium)
Räder	: Ø 100 mm
Sitzhöhe Serie 440	: 42 – 54 cm (12 cm Hub)
Sitzhöhe Serie 490 (Elektrostühle)	: 48 – 73 cm (25 cm Hub)
Sitzhöhe Alternativ 490 (Elektrostühle mit Drehvorrichtung)	: 42 – 60 cm (18 cm Hub)
Sitzplatte Breite x Tiefe	: 46 x 46 cm
Rückenplatte 441 / 491 Breite x Höhe	: 40 x 30 cm
Rückenplatte 442 / 492 Breite x Höhe	: 40 x 44 cm
Einstellbare Höhe der Rückenlehne 441 / 491	: 0 – 14 cm
Einstellbare Höhe der Rückenlehne 442 / 492	: 0 – 12 cm
Sitztiefenverstellung durch Rückenlehne	: 46 – 38 cm
Sitzwinkelverstellung	: bis 17 Grad
Armlehnenhöhenverstellung	: 0 – 31 cm
Armlehnen	: Breite 8 cm, Länge 32 cm
Breiteneinstellung zw. den Armlehnen	: 36 cm min., 54 cm max.
Batterie (Elektrostühle)	: 12 V, 6,5 Ah
Ladegerät	: 12 V, 1 Ah

Garantie

Auf den Euroflex – Arbeitsstuhl gewähren wir Ihnen eine 12 monatige Garantiezeit, gerechnet ab dem Ausstellungsdatum der Rechnung.

Die Garantie beinhaltet die Reparatur bei Herstellungs- und Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung oder Austausch von defekten Teilen.

Über unsere Garantieleistung hinausgehende Ansprüche, wie z.B. Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Keine Garantie kann übernommen werden bei:

- unsachgemäßer Bedienung
- wenn der Stuhl zu anderen Zwecken benutzt oder bedient wird, als in der Betriebsanleitung angegeben
- bei normalem Verschleiß oder Abnutzung
- Montage oder Reparatur durch dritte unsachkundige Personen, sowie das Verwenden oder Montieren von nicht Original Euroflex – Stuhlteilen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren direkten Stuhllieferanten.

Herstellungswerk:

Importeur:

KONTAKT

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Benutzung des Produktes benötigen,

KONTAKT

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Benutzung des Produktes benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler. Mit dem Hersteller können Sie wie folgt Kontakt aufnehmen:

RvS Eurovema AB
Box 1179
141 24 Huddinge
SWEDEN

Tel:+46-8-449 58 00
Fax: +46-8-740 40 18

E-mail: information@rvseurovema.se
Webseite: www.rvseurovema.se